

BRUKSIZM,ZGRZYTANIE,SZYNA RELAKSACYJNA+PUDEŁKO

Cena : 14,00 zł

Nr katalogowy : **016**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**ZESTAW ZAWIERA:**

*Relaksacyjną szynę na bruksizm
do indywidualnego modelowania w ustach pacjenta
+ pudełko higienicznego przechowywania!*

Dlaczego ten zestaw?

- gwarancja jakości pochodząca od długoletniego, sprawdzonego partnera*
- nie uczula i nie podrażnia,w przeciwieństwie do innych,
tańszych zamienników gorszej jakości*
- wyprodukowany z kopolimeru EVA a nie z PVC,
silikonu czy lateksu (gorszych jakościowo i*

uczulających)

-kupujesz w POLSKIEJ FIRMIE

-natychmiastowa wysyłka

-ponad 700szt sprzedanych

w ciągu ostatnich 24 m-cy!

-99% zadowolonych klientów

-sprzedajemy tylko oryginalne produkty!



Nasza szyna relaksacyjna jest idealnym sposobem na złagodzenie objawów niekontrolowanego i nawykowego zaciskania i zgrzytania zębów!

Sposób przygotowania szyny:

1. zanurzyć w wodzie szynę na około **(2-3 sekundy!!!)** w temp bliskiej wrzeniu.
Zbyt długie przetrzymanie w wodzie może zniszczyć szynę.
2. wyjąć szynę z wody, nałożyć na dolny łuk zębowy, docisnąć od strony przedstonkowej i językowej oraz zagryźć
3. pozostawić w jamie ustnej przez około 5 sekund
4. w miarę potrzeby powtórzyć czynności 2,3 aż do dokładnego dopasowania szyny do łuku zębowego
5. jeśli istnieje taka potrzeba, usunąć nadmiary szyny małymi nożyczkami, tak aby nie dotykała i nie raniła brzegów dziąsłowych.


Przeciwwskazania:

- *ruchoma proteza dentystyczna,
- *ból w stawie szczękowo-żuchwowym,
- *choroby przyzębia,
- *ruchome zęby,
- *w szczęce lub żuchwie występuje
mniej niż 10 zębów

Zobacz jak powinna wyglądać szyna po indywidualnym wymodelowaniu :



Sleep Bruxism: Diagnosis and Treatment with the Luco Hybrid OSA Appliance[®]

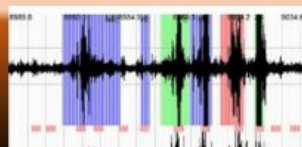

*Do każdej szyny dodajemy pudełko!
oraz instrukcję użycia w jęz. polskim.*



**Kolor pudełka wysłany jest losowo.*

Nasz produkt jest alternatywą dla profesjonalnego leczenia.

