

2 NAKŁADKI DO WYBIELANIA ZĘBÓW, OPALESCENCE

Cena : 6,99 zł

Nr katalogowy : **020**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI**

**2 szt.termokurczliwych nakładek wielokrotnego użytku
do wybielania zębów.**

***Doskonale pasują do zestawów żeli nie tylko Opalescence,
ale też Perfect Smile, Biała Perła itp.***

- 1 na dolny i 1 na górny łuk zębowy -



2 Nakładki Termokureczliwe

Dzięki idealnemu dopasowaniu równomiernie
wybielisz swoje zęby!!!

Nakładki są bezpieczne w stosowaniu z mocnymi żelami
dzięki zastosowaniu specjalnego tworzywa EVA,
nie wydzielając przy tym szkodliwych substancji.

Mogą być stosowane wielokrotnie (1-3 razy)
w przeciwieństwie do innych, tańszych zamienników!

Dopasowują się do Twoich zębów pod wpływem wody;
są bardzo dobrej jakości.

Sposob użycia:

1. Podgrzać wodę do temperatury bliskiej wrzenia.
2. Umieścić ustawioną nakładkę pionowo w wodzie tak, aby była w pełni zanurzona (na ok.3 sekundy).
Nie należy dopuścić do sklejenia się jej ścianek na wskutek uplastycznienia materiału.
UWAGA!
Zbyt długie trzymanie w wodzie może zniszczyć nakładkę!
3. Wyjąć nakładkę z wody. Przed włożeniem jej do jamy ustnej, sprawdzić palcami, czy nie jest zbyt gorąca.
4. Umieścić nakładkę w jamie ustnej, tak jak przedstawiono na rysunku, zakrywając nią na kształt litery U cały łuk zębowy.
5. Zaciśnąć usta i dociskając nakładkę za pomocą palców, policzków i języka przytrzymać przez 30 sekund, odsysając jednocześnie wodę z szyny.
6. Ściągnąć nakładkę z łuku zębowego i ostudzić pod strumieniem zimnej wody.
7. Nakładkę można odpowiednio dociąć, zapewniając w ten sposób niezbędną wygodę użytkowania.
8. Nakładka gotowa do użycia.

Uwaga: Jeżeli nakładka jest zbyt zimna aby dopasować ją do zębów można powtórzyć operację nagrzewania.



**GWARANCJA
WYSYŁKI**

w 24 godziny

