

**2 NAKŁADKI DO WYBIELANIA ZĘBÓW, OPALESCENCE**

**Cena : 6,99 zł**

Nr katalogowy : **020**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**



**NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI**

**2 szt.termokurczliwych nakładek wielokrotnego użytku  
do wybielania zębów.**

\*\*\*Doskonale pasują do zestawów żeli nie tylko Opalescence,  
ale też Perfect Smile, Biała Perła itp.\*\*\*

- 1 na dolny i 1 na górny łuk zębowy -



## 2 Nakładki Termokurczliwe

Dzięki idealnemu dopasowaniu równomiernie  
wybielisz swoje zęby!!!

Nakładki są bezpieczne w stosowaniu z mocnymi żelami  
dzięki zastosowaniu specjalnego tworzywa EVA,  
nie wydzielając przy tym szkodliwych substancji.

Mogą być stosowane wielokrotnie (1-3 razy)  
w przeciwieństwie do innych, tańszych zamienników!

Dopasowują się do Twoich zębów pod wpływem wody;  
są bardzo dobrej jakości.

**Sposob użycia:**

1. Podgrzać wodę do temperatury bliskiej wrzenia.

2. Umieścić ustawioną nakładkę pionowo w wodzie tak, aby była w pełni zanurzona ( na ok.3 sekundy ).  
Nie należy dopuścić do sklejenia się jej ścianek na wskutek uplastycznienia materiału.

**UWAGA!**

Zbyt długie trzymanie w wodzie może zniszczyć nakładkę!

3. Wyjąć nakładkę z wody. Przed włożeniem jej do jamy ustnej, sprawdzić palcami, czy nie jest zbyt gorąca.

4. Umieścić nakładkę w jamie ustnej, tak jak przedstawiono na rysunku, zakrywając nią na kształt litery U cały łuk zębowy.

5. Zaciśnąć usta i dociskając nakładkę za pomocą palców, policzków i języka przytrzymać przez 30 sekund, odsysając jednocześnie wodę z szyny.

6. Ściągnąć nakładkę z łuku zębowego i ostudzić pod strumieniem zimnej wody.

7. Nakładkę można odpowiednio dociąć, zapewniając w ten sposób niezbędną wygodę użytkowania.

8. Nakładka gotowa do użycia.

Uwaga: Jeżeli nakładka jest zbyt zimna aby dopasować ją do zębów można powtórzyć operację nagrzewania.



**GWARANCJA  
WYSYŁKI**

*w 24 godziny*

