

**APARAT NA CHRAPANIE, SZYNA PRZECIWI CHRAPANIU, ANTYCHRAPACZ****Cena : 49,00 zł****Cena promocyjna : 44,00 zł**Nr katalogowy : **022**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

# SnoreMender®

sleep well, enjoy life



"**Chrapanie** to wibracja języczka i podniebienia miękkiego podczas wdechu.

Najczęściej występuje podczas snu.

Choć nie zagraża życiu, może być objawem groźnego bezdechu sennego.

Chrapanie może utrudniać sen osobie dotkniętej tym problemem i innym, śpiącym w pobliżu.

Ocenia się, że około 30% dorosłych ludzi chrapie.

Przyczyną chrapania jest utrudniony przepływ powietrza przez drogi oddechowe,

co powoduje turbulencje wprawiające podniebienie i języczek w drgania.

Utrudnienia te mogą wynikać z alergii (obrzęk ścian dróg oddechowych), otyłości (ucisk tkanki tłuszczowej na gardło)

lub osłabienia mięśniówki gardła.

# **Aparaty wewnątrzustne wysuwające do przodu żuchwę - -leczenie chrapania i bezdechu w stopniu lekkim i umiarkowanym.**



## **Dlaczego warto kupić ten zestaw?**

**\*wykonany z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW co  
przekłada się na bezpieczeństwo podczas użytkowania!**

**\*nie uczula i nie podrażnia-w przeciwieństwie do innych,podobnych  
aparatów gorszej jakości oferowanych na Allegro.**

*\*zmniejsza lub eliminuje chrapanie oraz bruksizm  
(mimo tego przy występowaniu cięższych objawów  
warto skonsultować się z lekarzem laryngologiem)*

*\*rozluźnia mięśnie żuchwy,zapewniając komfort snu  
i umożliwiając oddychanie przez usta*

*\*zwiększa dopływ tlenu do organizmu,co poprawia jakość Twojego snu oraz  
powoduje to,że w końcu wstajesz rano wypoczęty*

*\*jest całkowicie nieszkodliwy-nie jest lekiem i jest bardzo lekki,  
a przez to mniej uciążliwy podczas snu.*



Dzięki elastycznemu materiałowi termoplastycznemu z którego został wykonany,  
jest łatwy do wymodelowania wewnątrz ust pacjenta.

Może być formowany kilkakrotnie (1-3) w zależności od potrzeb,  
co zapewnia optymalne ułożenie aparatu w ustach.

W przedniej części posiada otwór ułatwiający przepływ powietrza.



**Zestaw zawiera:**

\*aparat termoplastyczny do indywidualnego modelowania

\*pudełko do higienicznego przechowywania

\*zaczep do formowania w gorącej wodzie


\*instrukcję obsługi



# THE SCIENCE



**This Comfortable & Effective Device (Mandibular Advancement Device) works by inserting the mouthpiece into your mouth and over your teeth. The mouthpiece is moulded to the shape of your mouth, which you can do by following the easy to follow instructions. It holds your jaw in a forward position while you sleep, opening your airway and thus preventing snoring.**

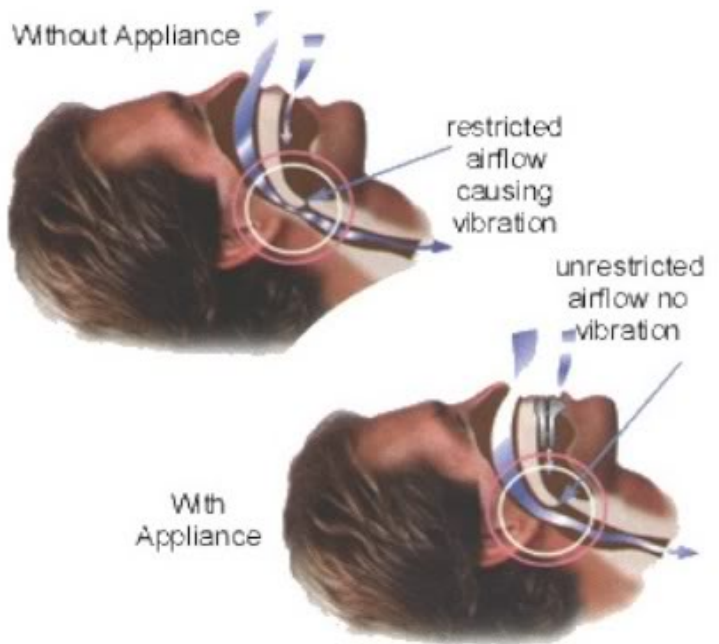

**INFINITIVE BEAUTY LTD**

**PROFESSIONAL DISTRIBUTOR OF ANTI SNORE DEVICES**

## **Sposób działania:**

- 1) zablokowane górne drogi oddechowe
- 2) odblokowane po użyciu aparatu



## **Przeciwwskazania:**

- \*ruchome zęby lub proteza dentystyczna
- \*ból i choroby przyzębia
- \*bezdech senny umiarkowany lub silny

**Sposób użycia:**

Po podgrzaniu materiału w gorącej wodzie (ok.70-80 stopni) termoplastyczny materiał z którego wykonany jest aparat staje się miękki i pozwala się kształtować.

W tym stanie aparat jest dopasowywany do dolnej i górnej szczęki,

a po ostygnięciu jest już przygotowany do noszenia

przez pacjenta w czasie snu.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w dołączonym pudełku po uprzednim umyciu

cieplą wodą z mydłem

**Czas stosowania:** ok.12 m-cy

**Waga:** ok.40 gram

\*nie zaleca się stosowania przez osoby

poniżej 18-go roku życia\*

# GOODNIGHT SLEEP

Finally Enjoy A Peaceful Nights Sleep With This Simple Device



**INFINITIVE BEAUTY LTD**

**PROFESSIONAL DISTRIBUTOR OF ANTI SNORE DEVICES**

---